


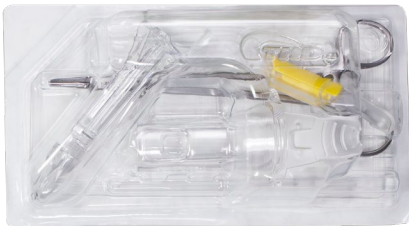

THD SLIDE ONE FAST

THD SLIDE	THD DOPPLER PROBE	THD SUTURE	THD BLOCK
			

Utilización

THD One Slide Fast es un kit específicamente diseñado para una utilización inmediata con desarterializador THD Revolution.

Descripción general


THD Slide es un anoscopio/proctoscopio específicamente diseñado para una mejor utilización del procedimiento THD en el tratamiento de los grados más altos de la patología hemorroidal. La particular forma del anoscopio/proctoscopio Slide, con la presencia de un carro extraíble posibilita la realización de la ligadura y resolución del prolapso con una sola herramienta, causando, por ende, la menor molestia posible al paciente y acelerando el procedimiento. El anoscopio/proctoscopio THD Slide está realizado en material plástico médico transparente, para permitir, junto a la utilización de una punta de fibras ópticas específicamente moldeada, una iluminación perfecta del campo operatorio. El anoscopio/proctoscopio específico THD Slide está específicamente diseñado para dar la tensión justa a la cavidad anal durante la intervención y tiene un específico alojamiento para el porta agujas THD. La sonda doppler suministrada se introduce dentro del anoscopio/proctoscopio y está en directo contacto con la mucosa para una precisa identificación de las arterias hemorroidales.

La caja de THD Slide One Fast incluye:

- 10 kits THD Slide desechable en blíster estéril, para una utilización inmediata
- 10 sondas doppler desechable en blíster estéril, para una utilización inmediata
- 10 envases de THD Suture (6 suturas cada una): suturas quirúrgicas reabsorbibles; (2-0) aguja 5/8 – 26,5 mm
- 10 envases de THD Block (3 suturas cada una): suturas quirúrgicas reabsorbibles con sistema autobloqueante, unidireccional con sistema de parada final; (2-0) aguja 1/2 círculo– 30 mm



- 10 tampones anales hemostáticos Spon Anal

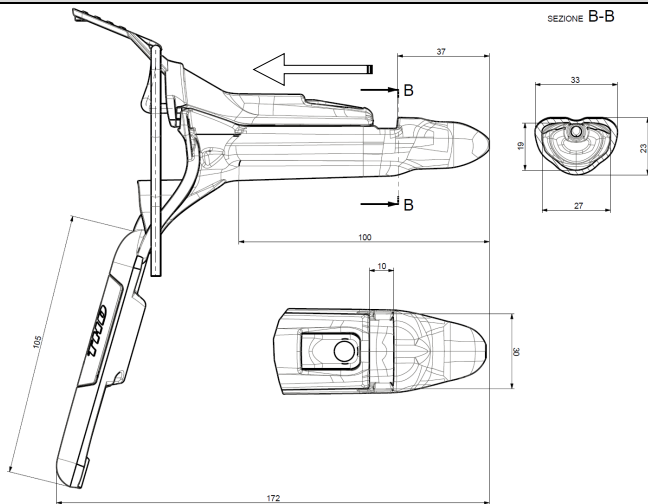Dimensiones	
THD SLIDE	
	
Dimensión interna	27x19 mm
Dimensión externa	33x23 mm
Longitud operatoria	100 mm
Ventana operativa (Variable)	30x10 mm mínima
Longitud total	172 mm
Longitud mango	105 mm

THD Slide One Fast				
REF	Cant.	Descripción	Clase de riesgo	EMDN
800280-10	10	THD Slide One Fast	-	Z12020604
incluye 710004	10	THD Slide (estéril) - con 1 proctoscopio con carro, 1 empujador, 1 portaaguja desechable	Ila	Z12020604
incluye 800063	10	Sonda Doppler desechable (estéril)	Ila	Z12059005
incluye 800050	10	Scrofolon Anal (estériles)	III	H010101010301
incluye 880059	10	THD Block (3 suturas - estériles)	III	M040503
incluye 880000	10	Envase de suturas (6 suturas - estériles)*	III	H0101010201
o				
incluye 880000	10	Envase de suturas (6 suturas -	III	H0101010201

Productos asociados		
REF	Cant.	Descripción
800133	1	THD REVOLUTION