



THD DERM A942 HIGH FREQ.



Uso

La unidad Derm 942 High Frequency Desiccator es perfecta para el tratamiento de la displasia anal y para otros procedimientos en anoscopia de alta resolución (HRA).

Descripción general

El Derm 942 High Frequency Desiccator es una unidad para electrocirugía de baja potencia, diseñada para su uso en consulta y que requiere un bajo mantenimiento.

La potencia se puede ajustar hasta 40 vatios con aumentos de 1/10 de vatio por los primeros 10 vatios de la escala, lo que permite una amplia variedad de usos.

La unidad incluye la pieza de mano esterilizable en autoclave con los botones para ajustar la potencia (800211) y el soporte de acero inoxidable para la fijación en el carro.

Datos técnicos	
Altura	18.8 cm
Anchura	22.8 cm
Profundidad	10.5 cm
Peso	<2.6 kg
Alimentación	100-240 V CA
Frecuencia de línea	50-60 Hz
Frecuencia de salida	328-429 kHz



THD DERM A942 HIGH FREQ.: ACCESORIOS

THD A902 REUSABLE HANDPIECE

REF. 800211



El Reusable Hand piece es una pieza de mano multiuso esterilizable en autoclave que se puede utilizar con Derm 942 High Frequency Desiccator. El Reusable Hand piece tiene 3 botones: con el botón azul se activa la salida monopolar y con los botones arriba-abajo se ajusta la potencia suministrada por Derm 942 High Frequency Desiccator. La pieza de mano se puede esterilizar en autoclave a vapor.

THD 13-5300 REUSABLE GRINDING

REF. 800209



El Derm 942 High Frequency Desiccator se puede usar con o sin cable de tierra y una almohadilla. Para evitar choques eléctricos accidentales al personal o al paciente, el Reusable Grounding Cable se puede conectar a la placa paciente del Derm 942 High Frequency Desiccator y se puede usar con el Disposable Grounding Pads (800210). Este producto está testado para 100 usos y se vende por separado.

THD GBS-DB1031A DISP. GROUND.

REF. 800210




El Disposable Grounding Pad se puede utilizar con el Reusable Grounding Cable (800209) para la puesta a tierra eléctrica del paciente sin contacto físico con el personal. Esta almohadilla genera la dispersión de la energía procedente del Derm 942 High Frequency Desiccator y la devuelve a la máquina, eliminando así todo riesgo de choque doloroso al paciente o al personal. El producto se vende por separado.



THD 14-4010HB SMOKE EVAC. FUS. REF. 800212

Para la aspiración simultánea de los humos durante el uso de Derm 942 High Frequency Desiccator, se conecta el Smoke-Evac Fusion High Frequency Desiccator Tubing Kit a la punta de la pieza de mano con 3 botones Reusable Hand Piece (800211) y el Smoke-Evac Fusion Probes. Luego, se conecta el conector de 9 mm al Smoke-Evacuator (800181) usando el puerto correspondiente.

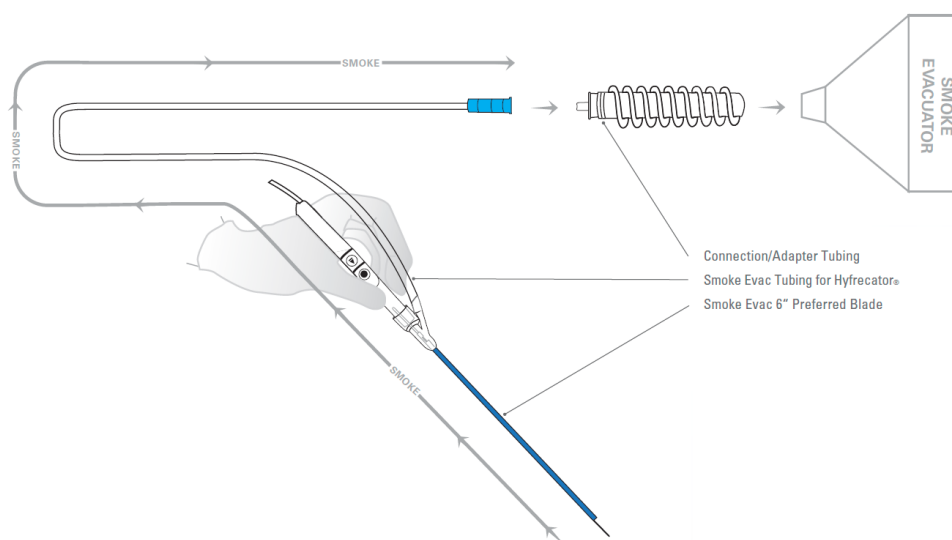

THD DERM A942 HIGH FREQ.		
Código	Cant.	Descripción
800231	1	THD DERM A942 HIGH FREQ.
800211	1	THD A902 REUSABLE HANDPIECE
800209	1	THD 13-5300 REUSABLE GRINDING
800210	1	THD GBS-DB1031A DISP. GROUND.
800212	1	THD 14-4010HB SMOKE EVAC. FUS.