



PUNTAS THD FUSION FLEX 6"

THD 14-1036 FUSION FLEX 6" BALL 3MM

REF. 8002216



La punta Smoke-Evac Fusion Flexible 6" 3mm Ball se utiliza para cerrar vasos sanguíneos durante procedimientos quirúrgicos mediante electrocoagulación. Esta punta también se utiliza para el tratamiento de la displasia anal durante anoscopia de alta resolución (HRA). Esta punta flexible permite al operador alcanzar un número de ángulos virtualmente infinito durante el tratamiento. El humo perjudicial será aspirado por la punta del electrodo. Si se acumulan residuos de tejidos quemados, limpiarlos con una gasa humedecida. Esta punta debe utilizarse con el Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) o con un juego de tubos específico (800212). Para obtener mejores resultados, utilizar con THD Light-Scope Procto HRA (800191) y doblar la punta hasta el ángulo deseado a unos 2 cm de la pieza de mano. Activar siempre el evacuador de humos durante el tratamiento para garantizar la máxima visibilidad y seguridad.

THD 14-1066 FLEX 6" BLADE

REF. 800219



El Smoke-Evac Fusion Flexible 6" Blade es una punta recubierta de teflón, con hoja de acero inoxidable, para la ablación de lesiones durante anoscopia de alta resolución (HRA) y para tratamientos que utilizan fulguración electroquirúrgica. La punta flexible permite al operador alcanzar un número de ángulos de tratamiento virtualmente infinito. El humo quirúrgico potencialmente perjudicial es aspirado por la punta del electrodo. Si se acumulan residuos de tejidos quemados, limpiarlos con una gasa humedecida. Esta punta debe utilizarse con Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) o con un juego de tubos específico (800212). Para obtener mejores resultados, utilizar con THD Light-Scope Procto HRA (800191) y doblar la punta hasta el ángulo deseado a unos 2 cm de la pieza de mano. Activar siempre el evacuador de



Ficha técnica

REF. 800216 REF. 800218
REF. 800219 REF. 800224
REF. 800217 REF. 800222
REF. 800220 REF. 800223

ES

humos durante el tratamiento para garantizar la máxima visibilidad y seguridad.

THD 14-1046 FUSION FLEX 6" BALL 5MM

REF. 800217



La punta Smoke-Evac Fusion Flexible 6" 5mm Ball se utiliza para cerrar vasos sanguíneos de mayores dimensiones durante procedimientos quirúrgicos mediante electrocoagulación. Esta punta flexible también se puede utilizar para el tratamiento de casos más extensos de displasia anal durante anoscopia de alta resolución (HRA). La punta flexible permite a los operadores alcanzar un número de ángulos de tratamiento virtualmente infinito. El humo quirúrgico potencialmente perjudicial es aspirado por la punta del electrodo. Si se acumulan residuos de tejidos quemados, limpiarlos con una gasa humedecida. Esta punta debe utilizarse con Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) o con un juego de tubos específico (800212). Para obtener mejores resultados, utilizar con THD Light-Scope Procto HRA (800191) y doblar la punta hasta el ángulo deseado a unos 2 cm de la pieza de mano. Activar siempre el evacuador de humos durante el tratamiento para garantizar la máxima visibilidad y seguridad.

THD 14-1045T FUSION FLEX 6" SUCT COAG TIP

REF. 800220



El Smoke-Evac Fusion 6" Flexible Suction Coag Tip es una punta recubierta de teflón utilizada para la aspiración de humos y líquidos mientras se cierran vasos sanguíneos, lo que permite una hemostasia más rápida. Esta punta flexible permite a los operadores alcanzar un número de ángulos de tratamiento virtualmente infinito. El humo quirúrgico potencialmente perjudicial es aspirado por la punta del electrodo. Si se utiliza un generador electroquirúrgico, esta punta se tiene que usar con la pieza de mano Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) y con el Tissue Catch Tubing Kit (800208). Se recomienda su uso con THD Light-Scope Procto HRA (800191).



THD 14-1056 FUSION FLEX 6" NEEDLE TIP REF. 800218



El Smoke-Evac Fusion Flexible 6" Needle Tip se utiliza para la eliminación de condilomas en procedimientos de anoscopia de alta resolución (HRA). La punta fina permite cortar los tejidos también cuando se usa con el High Frequency Dessicator (800231). Esta punta flexible permite a los operadores alcanzar un número de ángulos de tratamiento virtualmente infinito. El humo quirúrgico potencialmente perjudicial es aspirado por la punta del electrodo. Si se acumulan residuos de tejidos quemados, limpiarlos con una gasa humedecida. Esta punta debe utilizarse con la pieza de mano Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) o con un juego de tubos específico (800212). Para obtener mejores resultados, utilizar con THD Light-Scope Procto HRA (800191) y doblar la punta hasta el ángulo deseado a unos 2 cm de la pieza de mano. Activar siempre el evacuador de humos durante el tratamiento para garantizar la máxima visibilidad y seguridad.

PUNTAS THD FUSION FLEX 6"		
Código	Cant.	Denominación
800216	1	THD 14-1036 FUSION FLEX 6" BALL 3MM
800219	1	THD 14-1066 FLEX 6" BLADE
800217	1	THD 14-1046 FUSION FLEX 6" BALL 5MM
800220	1	THD 14-1045T FUSION FLEX 6" SUCT COAG TIP
800218	1	THD 14-1056 FUSION FLEX 6" NEEDLE TIP

DISPOSITIVOS CONECTADOS		
Código	Cant.	Denominación
800181	1	THD SMOKE EVACUATOR SE02-220
800231	1	THD DERM A942 HIGH FREQ.
800182	1	THD A1250 ESU (ELECTRIC SURGICAL UNIT)



Ficha técnica

REF. 800216	REF. 800218
REF. 800219	REF. 800224
REF. 800217	REF. 800222
REF. 800220	REF. 800223

ES

PUNTAS THD FUSION 2"

THD 14-1022 FUSION 2" BALL 5MM

REF. 800224



La punta Smoke-Evac Fusion 2" 5mm Ball Tip se utiliza para cerrar vasos sanguíneos de grandes dimensiones en los tratamientos perineales mediante electrocoagulación. Esta punta se puede utilizar para el tratamiento de casos más extensos de displasia perineal cuando hay mucha sangre durante la anoscopia de alta resolución (HRA). El humo quirúrgico potencialmente perjudicial es aspirado por la punta del electrodo. Si se acumulan residuos de tejidos quemados, limpiarlos con una gasa humedecida. Esta punta debe utilizarse con Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) o con un juego de tubos específico (800212).

THD 14-1002PA FUSION 2" PLASTIC BLADE

REF. 800222



El Smoke-Evac Fusion 2" Plastic Blade es una punta recubierta de teflón con hoja de acero inoxidable que se utiliza para la ablación de lesiones perineales en procedimientos de anoscopia de alta resolución (HRA) con fulguración electroquirúrgica. Si se acumulan residuos de tejidos quemados, limpiarlos con una gasa humedecida. Esta punta debe utilizarse con Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) o con un juego de tubos específico (800212).



Ficha técnica

REF. 800216 REF. 800218
REF. 800219 REF. 800224
REF. 800217 REF. 800222
REF. 800220 REF. 800223

ES



THD 14-1012 FUSION 2" NEEDLE TIP REF. 800223

La punta Smoke-Evac Fusion 2" Needle Tip se utiliza para la eliminación de condilomas externos en procedimientos de anoscopia de alta resolución (HRA). La punta fina permite cortar el tejido también cuando se usa con el High Frequency Dessicator (800231). Si se acumulan residuos de tejidos quemados, limpiarlos con una gasa humedecida. Esta punta debe utilizarse con Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) o con un juego de tubos específico (800212).

PUNTAS THD FUSION 2"		
Código	Cant.	Denominación
800224	1	THD 14-1022 FUSION 2" BALL 5MM
800222	1	THD 14-1002PA FUSION 2" PLASTIC BLADE
800223	1	THD 14-1012 FUSION 2" NEEDLE TIP

DISPOSITIVOS CONECTADOS		
Código	Cant.	Denominación
800181	1	THD SMOKE EVACUATOR SE02-220
800231	1	THD DERM A942 HIGH FREQ.
800182	1	THD A1250 ESU (ELECTRIC SURGICAL UNIT)